

Produktdatenblatt

NewPro Emplastrum - Pflaster die wiederverwertbare, blutstillende Wundauflage

Sie haben sich beim Rasieren oder Hauswirtschaften geschnitten? - Kein Problem, einfach

NewPro Emplastrum auf die Wunde halten und das Blut stoppt und es bildet sich schnell eine Haut. Die Wunde heilt.

NewPro Emplastrum ist aus hochwertigem polymeren Kunststoff gefertigt. Das Material ist auf Biokompatibilität und Hautverträglichkeit geprüft. **NewPro Emplastrum** ist ein Medizinprodukt ohne chemische Zusatzstoffe, der zur kompressiven Wundbehandlung bei kleinen Schnitt- oder Schürfwunden eingesetzt werden kann.

NewPro Emplastrum ist nur für eine Person bestimmt und kann nach einer gründlichen Reinigung und Desinfektion nach Gebrauchsanweisung bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums, 5 Jahre ab Herstellungsdatum immer wieder benutzt werden.

NewPro Emplastrum

schließt kleine Wunden in
Sekunden

Kein brennender Schmerz, kein
Wässern, keine Schorfbildung



Kann immer
wieder
verwendet
werden.



REF FST-80/50



Nur für eine
Person bestimmt

LOT 109893



07/2017



PZN - 9094793



Ausgezeichnet mit dem iHoch3-Innovations-
Preis des Bundesministerium für Bildung und
Forschung

Anwendung:

1. Blut nicht abwischen.
2. Folie so auf die Wunde drücken, dass die Wundränder bedeckt sind.
3. Zwischen 1 und 3 Min. (je nach Größe der Wunde und Blutgerinnungsfaktor) gut angedrückt halten. Dann Wunde abwaschen und Folie nach Anleitung abwaschen und desinfizieren.

